

Du har gjort ett gott val av telefon! Ta dig en stund med bruksanvisningen så kommer du att kunna dra full nytta av din nya telefons alla fördelar!

Installation

Börja med att packa upp telefonen. Förpackningen innehåller:

- * telefon
- * lur
- * spiralsladd
- * telesladd
- * nätadaptor
- * bruksanvisning

Se bilden på sidan 2.

1

Koppla ihop lur och telefon med spiralsladden.

2

Koppla in telesladden i telefonen och den andra änden i ett vanligt telefonjack.

3

Koppla in nätadaptorns plugg i telefonen och sätt adaptorn i ett vägguttag.






Väggmontering

Telefonen kan väggmonteras. Avståndet mellan skruvarna du sätter på väggen är 83 mm (lodrätt). Vänd på plastdetaljen vid brytknappen för att luren skall kunna hänga på väggen.

Skötsel

Placera inte telefonen i starkt solljus. Du kan rengöra telefonen med en mjuk trasa och svag tvällösning. Använd inte starka rengöringsmedel. Telefonen är avsedd för normalt inomhusbruk.

Knappar

	R-knapp
	Återuppringning
	Extraförstärkning Av - På
	Ringsignalvolym Av - Låg - Hög
	Ringsignalton Låg - Medium - Hög

Återuppringing

Lyft på luren och tryck på  så ringer telefonen upp det senast slagna numret (max 20 siffror).

R-knapp

Används för tjänster i telefonnätet. Ex. för att pendla mellan och parkera samtal. Titta i telefonkatalogen för mer information. Under telefonen kan du ställa in R-knappen för det land du bor i. I de nordiska länderna skall inställningen vara 100 ms.

Ringsignalvolym

Ställ in om du vill ha ringsingalen avstängd, låg eller hög. Ringlampan fungerar i samtliga lägen.

Ringsignalton

Du kan ställa in lågt, medium eller högt tonläge.

Extraförstärkning

Koppla in och ur extraförstärkning genom att trycka på knappen.

Volymkontroll

Telefonen är försedd med en volymkontroll som fungerar när extraförstärkningen är inkopplad. Ställ in önskad ljudstyrka i luren med den.



WARNING! Använd volymkontrollen med förstånd - ljudstyrkan kan skada din hörsel.

Hörapparat

Om du har hörapparat kan du dra nytta av att telefonen är utrustad med t-spole. Ställ hörapparaten i T-läge så överförs ljudet från luren till hörapparaten störningsfritt.

Halsslinga

Tillbehöret halsslinga är särskilt fördelaktigt att använda om du har dubbla hörapparater. Ljudet går då in i båda apparater samtidigt. Jacket på sidan är till för att ansluta en halsslinga. Utgången är avpassad för att ge perfekt ljud tillsammans med Häger Neckloop Plus. Fråga där du köpte telefonen eller be oss på Häger hänvisa dig till återförsäljare. Detta uttag kan också användas för anslutning av valfri ljudutrustning. (3.5 mm stereoplug)

Problemlösning

Symptom	Åtgärd
Ingen linjeton	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera telesladden. Är den ordentligt ansluten både till telefon och telefonjack?• Kontrollera att telefonjacket fungerar genom att koppla in en annan telefon i jacket.
Ingen ringsignal	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att ringsignalen inte är avstängd.• Kontrollera om en annan telefon ringer i samma telefonjack.• Om du har många telefoner inkopplade på samma linje är det möjligt att telefonlinjen inte orkar driva alla ringsignaler. Koppla ur en telefon i taget och prova dig fram.
R-knappen fungerar ej	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera så att inställningen av R-knappen på undersidan är korrekt. För de nordiska länderna skall den vara 100 ms.
Volym-/tonkontrollen fungerar ej	<ul style="list-style-type: none">• Tryck på knappen för extraförstärkning för att aktivera förstärkning och volymkontroll.• Kontrollera att nätadaptorn är ansluten till både vägguttaget och telefonen. Se sida 2. Kontrollera så att det är spänning i vägguttaget genom att ansluta ex. en vanlig bordlampa.

Garanti

Denna produkt levereras med 1 års garanti från inköpsdagen. Under den tiden är alla reparationer eller utbyten (vår bedömning) kostnadsfria. Skulle du få problem med din produkt rekommenderar vi att du går igenom problemlösningsavsnittet i denna bruksanvisning, alternativt besöker www.hager-scand.se och går igenom felsökningsavsnittet där för din produkt. Kvarstår felet bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället tillsammans med felbeskrivning och ditt garantibevis.

OBS! Felbeskrivning måste bifogas.

Garantin täcker inte olyckor, felaktigt handhavande, åverkan eller skador, åskskador, ingrepp i apparaten eller fel på telenätet. Produkten får inte modifieras eller öppnas av någon som inte är auktoriserad Häger-representant. Denna garanti av Häger AB begränsar inte på något sätt dina lagliga rättigheter.

VIKTIGT: DITT KVITTO ÄR EN DEL AV DITT GARANTIBEVIS OCH MÅSTE SPARAS OCH UPPVISAS I HÄNDELSE AV REKLAMATION BASERAD PÅ GARANTI.

Häger AB förbehåller sig rätten att kunna modifiera produkten, dess specifikationer och relaterad utrustning i linje med sin policy för löpande produktförbättringar.

Häger Shake-Awake Jumbo

Vakna på morgonen utan att väcka grannarna! Lägg shakern under kudden och vakna ljudlöst men bestämt. Shakern har hela 2 meter sladd.

Snooze-knappen lyser vid larm så du ser att stänga av. Vill du hellre vakna till en ordentlig larmsignal, går det också. Volymen går att ställa in.



Jumbosiffror - så att du klart och tydligt ser vad klockan är, utan att gnugga sömnen ur ögonen eller ta på glasögonen.

Häger Shaker-Awake Jumbo är provad och godkänd av Hjälpmedelsinstitutet. Uppförd på förteckningen över BRA HJÄLPMEDEL.

Besök www.hager-scand.se