

**Du har gjort ett gott val av telefon! Ta dig en stund med bruksanvisningen så kommer du att kunna dra full nytta av din nya telefons alla fördelar!**

## Installation

Börja med att packa upp telefonen. Förpackningen innehåller:

- \* telefon
- \* lur
- \* spiralsladd
- \* telesladd
- \* nätadaptor
- \* bruksanvisning

Se bilden på sidan 2.

**1**

Koppla ihop lur och telefon med spiralsladden.

**2**

Koppla in telesladden i telefonen och den andra änden i ett vanligt telefonjack.

**3**

Koppla in nätadaptorns plugg i telefonen och sätt adaptorn i ett vägguttag.




## Väggmontering

Telefonen kan väggmonteras. Avståndet mellan skruvarna du sätter på väggen är 70 mm (lodrätt). Vänd på plastdetaljen vid brytknappen för att luren skall kunna hänga på väggen.

## Skötsel

Placera inte telefonen i starkt solljus. Du kan rengöra telefonen med en mjuk trasa och svag tvällösning. Använd inte starka rengöringsmedel. Telefonen är avsedd för normalt inomhusbruk.

## Knappar


	Ringa upp minne
	R-knapp
	Lagra minne
	Återuppringning
	Ringsignal (finns på baksidan) <b>AVSTÄNGD</b> / <b>Låg volym</b> / <b>Hög volym</b> / <b>Hög volym</b> hög ton / låg ton / hög ton

## Återuppringing

Lyft på luren och tryck på  så ringer telefonen upp det senast slagna numret (max 20 siffror).


## Lagra minne

Telefonen har 10 snabbminnen. Du lagrar ett nummer så här:

1. Lyft luren.
2. Tryck .
3. Tryck telefonnumret. Telefonen ringer inte upp numret nu.
4. Tryck .
5. Välj position/knapp **0-9** för minnet.
6. Lägg på luren.

Upprepa proceduren för att lagra fler minnen.

## Ringa upp minne

1. Lyft luren.
2. Tryck .
3. Välj minne **0-9**.

## Radera minne

Du raderar ett minne genom att lagra ett nytt nummer på samma minnesplats/position (**0-9**).

## -knapp

Används för tjänster i telefontätet. Ex. för att pendla mellan och parkera samtal. Titta i telefonkatalogen för mer information.

## Ringsignal

Knappen finns på baksidan av telefonen. Du kan ställa in lågt eller högt tonläge. Eller stänga av ringsignalljudet helt. Blixtindikationen fungerar i samtliga lägen.

## Volymkontroll

Telefonen är försedd med en volymkontroll. Ställ in önskad ljudstyrka i luren med den.



**WARNING!** Använd volymkontrollen med förstånd - ljudstyrkan kan skada din hörsel.

## Tonkontroll

Tonkontrollen, som sitter bredvid volymkontrollen, ger dig möjlighet att ställa in ljudet så att det passar dig bäst. Prova dig fram till bästa inställningen.

## Hörapparat

Om du har hörapparat kan du dra nytta av att telefonen är utrustad med t-spole. Ställ hörapparaten i T-läge så överförs ljudet från luren till hörapparaten störningsfritt. Om du har dubbla hörapparater kan du få extra bra ljud med en **halsslinga**.



### Ljuduttag

Detta uttag kan användas för anslutning av valfri ljudutrustning. Ex. stolsslingas eller halsslingas förstärkare eller annan utrustning för förstärkning eller inspelning av ljudet. (3.5 mm stereoplug). Om du har dubbla hörapparater är en **halsslinga** bästa valet; **Häger NeckloopPlus** är godkänd för att använda med din telefon.



### Vibratoruttag

I detta uttag kan du koppla en kuddvibrator för att inte missa telefonsamtal när du sover. Vibratorn, som aktiveras vid ringsignal, kan köpas som tillbehör där du köpte telefonen eller direkt från Häger. Utgången som ger 8V DC, 250mA, vid ringsignal kan också användas för att koppla in andra typer av varseblivningshjälpmedel. (3.5 mm monoplug)

## Problemlösning

Symptom	Åtgärd
Ingen linjeton	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera telesladden. Är den ordentligt ansluten både till telefon och telefonjack?</li><li>• Kontrollera att telefonjacket fungerar genom att koppla in en annan telefon i jacket.</li></ul>
Ingen ringsignal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att ringsignalen inte är avstängd - se på baksidan av telefonen.</li><li>• Kontrollera om en annan telefon ringer i samma telefonjack.</li><li>• Om du har många telefoner inkopplade på samma linje är det möjligt att telefonlinjen inte orkar driva alla ringsignaler. Koppla ur en telefon i taget och prova dig fram.</li></ul>
Ingen blix	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampan skall blixtra vid ringsignal. Gör den inte det, kontrollera att nätadaptorn är ansluten till både vägguttaget och telefonen. Se sida 2. Kontrollera så att det är spänning i vägguttaget genom att ansluta ex. en vanlig bordlampa.</li></ul>
Volymkontrollen fungerar ej	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att nätadaptorn är ansluten till både vägguttaget och telefonen. Se sida 2. Kontrollera så att det är spänning i vägguttaget genom att ansluta ex. en vanlig bordlampa.</li></ul>

## Garanti

Denna produkt levereras med 1 års garanti från inköpsdagen. Under den tiden är alla reparationer eller utbyten (vår bedömning) kostnadsfria. Skulle du få problem med din produkt rekommenderar vi att du går igenom problem-lösningssvaret i denna bruksanvisning, alternativt besöker [www.hager-scand.se](http://www.hager-scand.se) och går igenom felsökningsavsnittet där för din produkt. Kvarstår felet bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället tillsammans med felbeskrivning och ditt garantibevis.

OBS! Felbeskrivning måste bifogas.

Garantin täcker inte olyckor, felaktigt handhavande, åverkan eller skador, åskskador, ingrepp i apparaten eller fel på telenätet. Produkten får inte modifieras eller öppnas av någon som inte är auktoriserad Häger-representant. Denna garanti av Häger AB begränsar inte på något sätt dina lagliga rättigheter.

**VIKTIGT: DITT KVITTO ÄR EN DEL AV DITT GARANTIBEVIS OCH MÅSTE SPARAS OCH UPPVISAS I HÄNDELSE AV REKLAMATION BASERAD PÅ GARANTI.**

Häger AB förbehåller sig rätten att kunna modifiera produkten, dess specifikationer och relaterad utrustning i linje med sin policy för löpande produktförbättringar.

## Häger Shake-Awake Jumbo

Vakna på morgonen utan att väcka grannarna! Lägg shakern under kudden och vakna ljudlöst men bestämt. Shakern har hela 2 meter sladd.

Snooze-knappen lyser vid larm så du ser att stänga av. Vill du hellre vakna till en ordentlig larmsignal, går det också. Volymen går att ställa in.

Jumbosiffror så att du klart och tydligt ser vad klockan är, utan att gnugga sömnen ur ögonen eller ta på glasögonen.

***Häger Shaker-Awake Jumbo är provad och godkänd av Hjälpmedelsinstitutet. Uppförd på förteckningen över BRA HJÄLPMEDEL.***

